


# FC-0211

Bandhouderplaten vlak (25 mm)

---


## Instructies

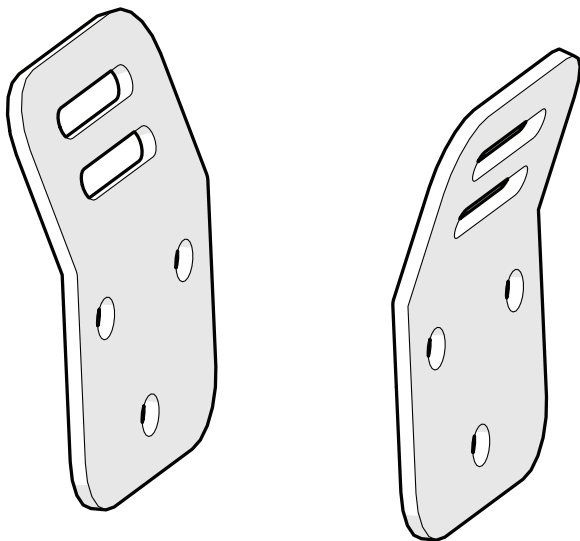


## Monteren Bandhouderplaten

Kies de geschikte bevestiging voor de bandhouderplaat aan de rolstoel:

- Kies positie A wanneer de bandhouderplaat bij een 4-punts heupgordel wordt toegepast.
- Kies positie B wanneer de bandhouderplaat in combinatie met een houdingsvest wordt toegepast.

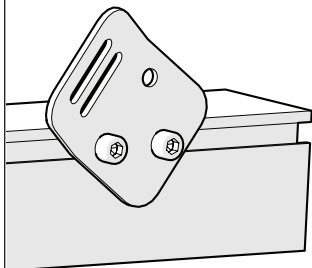


**Positie B**

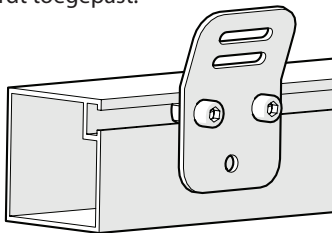

**Positie A**

Monteer de bandhouderplaten aan het railsysteem volgens de afbeelding hiernaast.


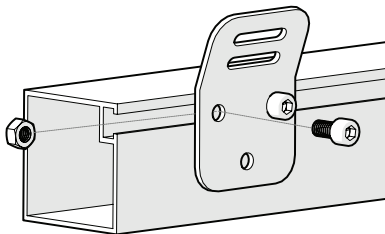


## Kies een geschikte bevestiging voor de band.

- Gebruik voor verstelgemak de meegeleverde **Cam-buckles**
- Is dit niet mogelijk gebruik dan de sleuven van de **bandhouderplaten** (zie hiervoor de achterzijde).

## Cam-buckles

Monteer de bijgeleverde Cam-buckles aan de bandhouderplaten. Gebruik hiervoor de sleuven op de bandhouderplaat.

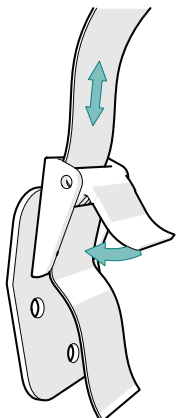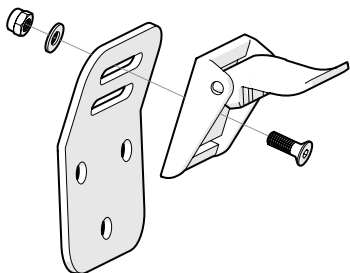


### Afstellen Cam-buckle

1. Haal de banden door de Cam-buckles en stel de gewenste lengte in.
2. Sluit vervolgens de Cam-buckles

## Bandhouderplaten

Haal de band volgens onderstaand plaatje door de sleuven.

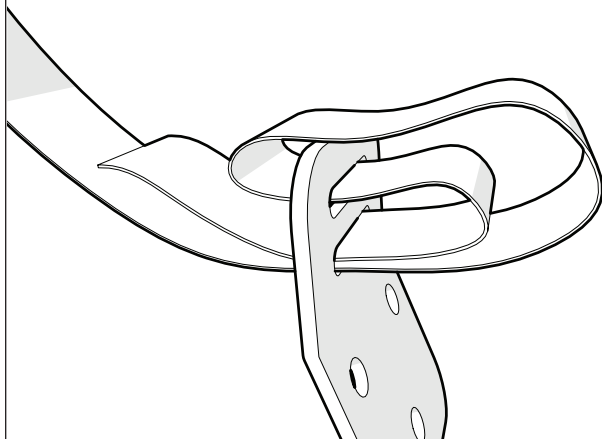

Deze instructie is ook te vinden op onze website.