


FC-0511

Bandhouderplaten vlak (50 mm)

Instructies

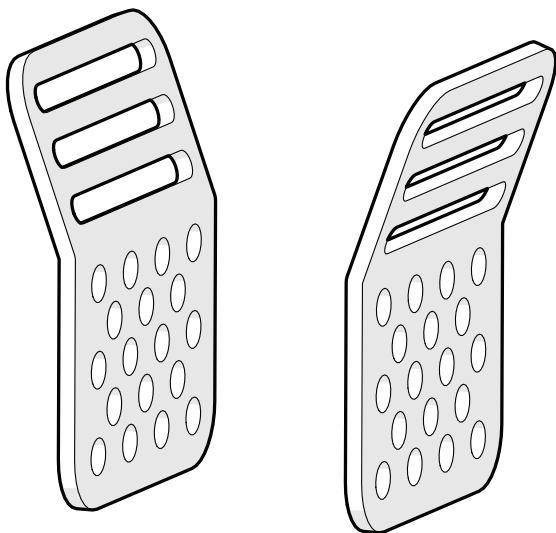


Monteren Bandhouderplaten

Kies de geschikte bevestiging voor de bandhouderplaat aan de rolstoel. Monteer vervolgens de bandhouderplaten aan het railsysteem volgens de afbeelding hieronder


Let op:

- Plaats de bandhouderplaat zo ver mogelijk achter op de rolstoel, zodat de banden achter en onder de billen van de cliënt weglopen.

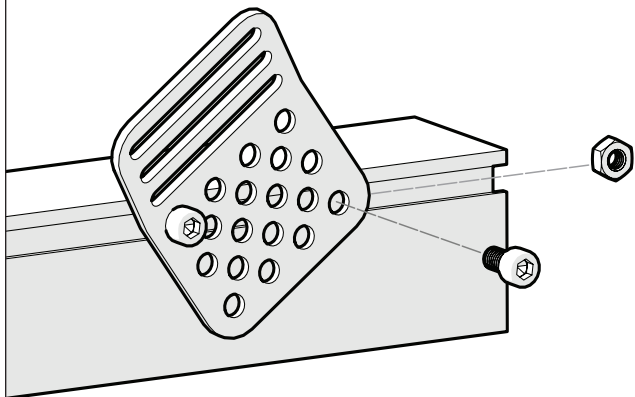

Bevestiging band

Haal de band volgens onderstaand plaatje door de sleuven.

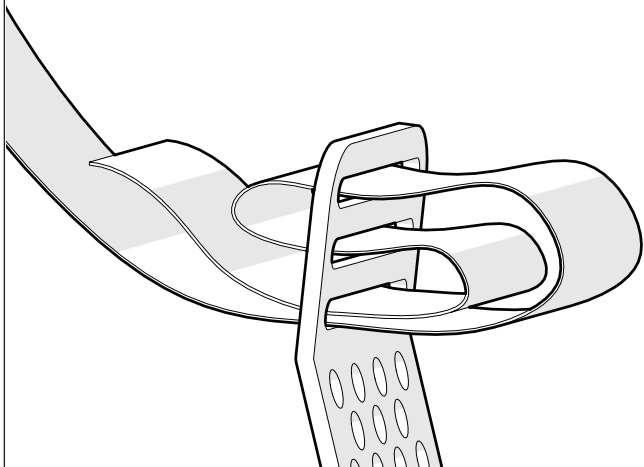



Deze instructie is ook te vinden op onze website.

Support +31 (0)88 - 011 49 00

www.lewisseatingsystems.nl