



Lewis handleiding Vierpersoons wandelwagen

www.lewisseatingsystems.nl

Lewis
SEATING SYSTEMS

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld en is gebaseerd op de informatie zoals bekend bij Lewis Seating Systems op het moment van verschijnen. Lewis Seating Systems neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of gevolgen daarvan.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de Lewis vierpersoons wandelwagen. Lewis Seating Systems neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door aanpassingen en plaatsen door derden.

De geleverde vierpersoons wandelwagen voldoet aan de essentiële eisen die vermeld worden in Annex 1 van de Medische Verordening 2017-745.

Dit is de versie van juni 2025. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. De meest recente Lewis handleiding is te vinden op onze website: www.lewisseatingsystems.nl

Copyright © 2025

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsbestand, of op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Lewis Seating Systems.

INHOUD

Inhoud	3
Eu-Conformiteitsverklaring	4
Onderhoud	5
Gebruiksaanwijzingen	6
Veiligheidsvoorschriften	8
Labelling	9
Recycling	10
Garantie	10
Ernstige incidenten	10

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant

Lewis Seating Systems B.V.

Willem Vleertmanstraat 23, 7575 EC Oldenzaal, Nederland

Verklaart hierbij dat het onderstaande hulpmiddel:

Geregistreerde handelsnaam:	Lewis vierpersoons wandelwagen
Productcodes:	VPW
Producttype:	Vierpersoons wandelwagen
Risicoklasse:	Klasse 1

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende verordening:

Verordeningen 2017/745 van het Europese parlement en de raad van 5 april 2017

dat te identificeren is aan de:

Overeenkomstige labels op de achterkant van deze handleiding en de zitorthese

en zijn in overeenstemming met de volgende Europese gestandaardiseerde normen:

NEN-EN 14971	Medical devices – Application of risk management to medical devices
NEN-EN 1021-2	Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent

Getekend namens Lewis Seating Systems,

Mevr. F.E.M. Huttenhuis,
Algemeen directeur

Datum: 2 juni 2025



ONDERHOUD

Een Lewis vierpersoons wandelwagen heeft weinig onderhoud nodig. Aangeraden wordt maandelijks de wandelwagen te reinigen met een vochtige doek of een borstel en jaarlijks een controle uit te laten voeren door een Lewis zitadviseur.

De wandelwagen bestaat uit een onderstel en zitkuipjes of zitplankjes die bevestigd zijn op het onderstel volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen. De zitkuipjes zijn voorzien van een afneembare cover. Deze kan worden gewassen. Volg hiervoor de wasinstructies die op het label staan. De zitplankjes zijn voorzien van een vaste cover. Als er een nieuwe cover moet worden geplaatst, mechanische onderdelen niet meer werken of als er andere onderhoudsproblemen zijn, neem dan contact op met Lewis Seating Systems.

Afhankelijk van de gebruikintensiteit zijn de covers van de zitkuipjes en zitplankjes na twee tot drie jaar toe aan vervanging.

GEBRUIKSINSTRUCTIES


De Lewis vierpersoons wandelwagen is bedoeld als vervoersmiddel voor mensen met een beperking en kan een maximum totaal gewicht aan van 210 kg. De doelgroep wordt gevormd door personen met een lichamelijke beperking die niet langdurig kunnen wandelen.

De vierpersoons wandelwagen is volgens de Lewis-richtlijnen naar de wensen van de gebruiker afgesteld en heeft geen verstelmogelijkheden die zelf kunnen worden uitgevoerd.


Houdingsvest (optioneel)

Lewis biedt verschillende types houdingsvesten. Door het toepassen van een houdingsvest kan een stabiele houding worden opgelegd en leert de gebruiker deze stabiele houding in te nemen. De vesten zijn gemaakt van een comfortabel materiaal en zijn afgewerkt met een bies. De clips die in de clip-houders zitten kunnen geopend worden door aan beide zijken van de clip te drukken (zie figuur 1).

Door aan de D-ringen te trekken kunnen de banden strakker worden aangetrokken (zie figuur 2). De banden kunnen losser gemaakt worden door de banden in de gespen naar boven te trekken en op deze manier de banden te verlengen.

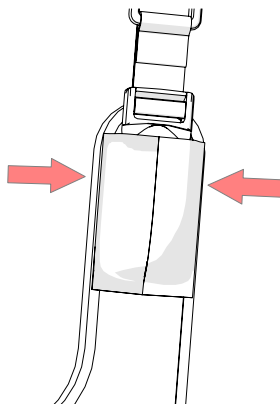

Figuur 1 - Openen clips houdingsvest

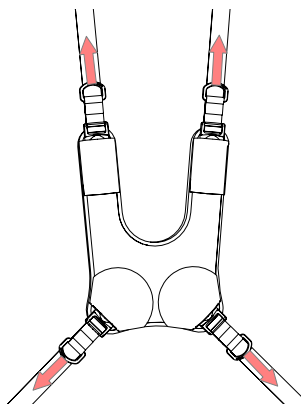

Figuur 2 - Verstellen houdingsvest


Heupgordel (optioneel)

Lewis biedt verschillende types heupgordels. De Lewis heupgordel helpt de eindgebruiker bij het achterin de zittingorthese zitten. Daarnaast wordt de houding beperkt wat een extra gevoel van veiligheid kan creëren. De meeste gordels zijn gemaakt van een comfortabel materiaal en afgewerkt met een bies. Door op de blauwe knop van de veiligheidsgesp te drukken opent de heupgordel.

Door aan de D-ring te trekken kan de gordel strakker worden getrokken (zie figuur 3). Door aan de verschillende banden te trekken wordt er meer ruimte gecreëerd voor de gebruiker.

Handrem

Bij het op- en afstappen dient altijd de parkeerrem (figuur 4) te worden ingeschakeld. De parkeerrem voorkomt dat de wandelwagen onbedoeld in beweging komt en vermindert het risico op gevaarlijke situaties. De twee parkeerremmen activeer je door de hendel volledig naar beneden te drukken (figuur 5). Hierdoor wordt het achterwiel geblokkeerd en staat de wandelwagen stabiel en veilig geparkeerd.

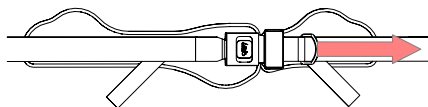

Figuur 3 - Verstellen heupgordel



Figuur 4 - parkeerrem gedeactiveerd



Figuur 5 - parkeerrem geactiveerd

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De Lewis vierpersoons wandelwagen kan zowel binnens- als buitenshuis worden gebruikt. Het maximale gebruiksgewicht is 210 kg.

LET OP

De wandelwagen mag uitsluitend worden gebruikt op trottoirs en wandelpaden. Gebruik op de rijbaan of andere wegen is niet toegestaan.

Bij het in- en uitstappen van gebruikers dient de wandelwagen ten allen tijde op de handrem te staan om weggrollen te voorkomen

De wandelwagen is uit te breiden met de volgende accessoires van Lewis:

- Houdingsvest
- Houdingsgordel
- Zitbroekje

Indien er aan de wandelwagen iets gewijzigd moet worden, vraag dan een behandelaar of een Lewis zitadviseur om hulp.

Brandveiligheid

Alle bekleding van de zitorthese is getest volgens EN-1021-2. Dit betekent dat de bekleding zelfdovend is wanneer de vlam is weggehaald. Toch blijft het raadzaam om voorzichtig om te gaan met vuur en gloeiende voorwerpen bij en rondom de wandelwagen.

Overige waarschuwingen

Zet de wandelwagen niet in direct zonlicht: de bekleding kan te warm worden waardoor verbranding of

overgevoeligheid van de huid kan plaatsvinden. Laat de wandelwagen niet in contact komen met zeewater: zeewater is agressief en tast voornamelijk de metalen onderdelen van de wandelwagen aan.

Indien de veiligheidsvoorschriften, instructies, waarschuwingen en onderhoudsadviezen niet worden opgevolgd, kan dit de werking van de wandelwagen nadelig beïnvloeden en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan de zitkuipjes of zitplankjes of het milieu tot gevolg hebben.

De wandelwagen met zitkuipjes of zitplankjes is veilig te gebruiken wanneer deze geïnstalleerd is door een Lewis zitadviseur.

Werkt de zitkuip of zitplank niet meer naar behoren neem dan contact op met Lewis Seating Systems.


Lees voordat de wandelwagen met zitkuipjes of zitplankjes in gebruik wordt genomen deze gebruikershandleiding door.

LABELLING



Figuur 27 - Positie label vierpersoons wandelwagen

Iedere vierpersoons wandelwagen is voorzien van een naamspecifiek label. Dit label is te vinden aan de achterkant van de vierpersoons wandelwagen op de stuurbuis

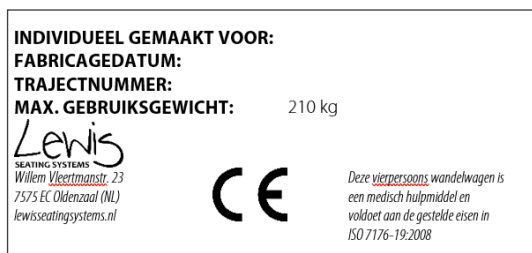

Figuur 29 - Naamspecifiek label

RECYCLING

De Lewis vierpersoons wandelwagen heeft, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, een levensduur tussen de negen en tien jaar.

Indien de wandelwagen overbodig of aan vervanging toe is dient deze vanuit milieu-oogpunt zoveel mogelijk gescheiden te worden afgevoerd, zodat de gebruikte materialen efficiënt gerecycled kunnen worden. Dit kan ook door de wandelwagen weer in te leveren bij Lewis Seating Systems.

GARANTIE

Op materiaal- of constructiefouten, met uitsluiting van de bekleding, geven wij een garantie van twaalf maanden.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Natuurlijk gaat Lewis ervanuit dat er niets gebeurt met u en de wandelwagen. Mocht er toch een ernstig incident optreden, waarbij de dood of een ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van de gebruiker kan of zou kunnen zijn teweeggebracht, dan dient deze gemeld te worden bij de fabrikant:

Lewis Seating Systems
Willem Vleermanstraat 23
7575 CE Oldenzaal
info@lewisseatingsystems.nl
+31 088 - 0114900

en bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gehuisvest.



orthese sticker

**Willem Vleertmanstraat 23
7575 EC Oldenzaal, Nederland
Tel. +31 (0)88 - 011 49 00
info@lewisseatingsystems.nl**